

## Preuzimanje Dijabetes.net aplikacije online dnevnika samokontrole

---

Da biste pristupili Dijabetes.Net-u, potrebno je registrirati se na web stranici <http://dijabetes.tv/profil/korisnik/index-2.php?p=register>

Aplikaciju Dijabetes.net-a možete preuzeti klikom na «**Aplikacija**» u desnom gornjem kutu sučelja ili klikom na «**Dnevnik samokontrole**» ili pod opisom Dijabetes.net aplikacija možete «**Preuzmite aplikaciju**».

Nakon što ste kliknuli na «**Preuzmite aplikaciju**» u podnožju web stranice odaberite «**Save**».

Pričekajte nekoliko trenutaka te nakon preuzimanja kliknite na «**Run**» koji se pojavio u podnožju web stranice. Kada se otvori prozor opet kliknite na «**Run**».

Nakon kraćeg vremena pojavit će se novi prozor i kliknite na «**Next**», zatim opet «**Next**» i još jednom «**Next**».

Pričekajte nekoliko minuta da se aplikacija preuzme na računalo te na otvoreni prozor kliknite «**Close**». Time ste gotovi s procesom preuzimanja aplikacije online dnevnika samokontrole.

Nakon uspješne instalacije na zaslonu računala pojavit će se ikona **Glukometer Klijent**.

Spojite svoj glukometar koristeći USB kabel s računalom. Na otvorenom prozoru koji traži način spajanja kliknite na «**USB**».

**Dobrodošli na aplikaciju Dijabetes.net!** Dostupne su informacije o uređaju, interni sat glukometra kao i spremljene vrijednosti razine šećera u krvi.

U dogovoru s liječnikom odaberite vremenski period kada ćete spojiti glukometar s računalom.

Prilikom spajanja glukometra s računalom, potrebno je kliknuti na «**Pošalji podatke na server**».

Ako su podaci uspješno spremljeni na server pojavit će novi prozor gdje trebate kliknuti «**OK**».

Želite li izaći iz aplikacije odaberite «**Odspoji se**» u lijevom gornjem kutu.