

Preuzimanje DijabetesTV aplikacije

Da biste pristupili DijabetesTV-u, potrebno je registrirati se na web stranici www.dijabetes.tv/registracija

Aplikaciju DijabetesTV možete preuzeti klikom na «**Aplikacija**» u desnom gornjem kutu sučelja ili klikom na «**Sustav za komunikaciju**» ili pod opisom DijabetesTV aplikacija možete «**Preuzmite aplikaciju**».

Nakon što ste kliknuli na «**Preuzmite aplikaciju**» u podnožju web stranice odaberite «**Save**».

Pričekajte nekoliko trenutaka te nakon preuzimanja kliknite na «**Run**» koji se pojavio u podnožju web stranice. Kada se otvori prozor opet kliknite na «**Run**».

Nakon kraćeg vremena pojavit će se novi prozor i kliknite na «**Next**», zatim opet «**Next**» i još jednom «**Next**».

Pričekajte nekoliko minuta da se aplikacija preuzme na računalo te na otvoreni prozor kliknite «**Close**». Time ste gotovi s procesom preuzimanja aplikacije.

Nakon uspješne instalacije na zaslonu računala pojavit će se ikona **Glukometer Klijent**.

Spojite glukometar U Right TD-4279 koristeći USB kabel sa svojim računalom. Na otvorenom prozoru koji traži način spajanja kliknite na «**USB**».

Dobrodošli na aplikaciju DijabetesTV! Dostupne su informacije o uređaju, interni sat glukometra kao i spremljene vrijednosti razine šećera u krvi.

Najmanje jednom tjedno, prilikom spajanja glukometra U Right TD-4279 s računalom, potrebno je kliknuti na «**Pošalji podatke na server**». Ako su podaci uspješno spremljeni na server pojavit će novi prozor gdje trebate kliknuti «**OK**».

Želite li izaći iz aplikacije odaberite «**Odspoji se**» u lijevom gornjem kutu.