

## **DijabetesTV**

**Više uspješnih liječenja.  
Manje nepotrebnih pregleda.  
Manje gužvi.**

Datum: 26. Ožujka 2018.

---

## 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

### Što je to?

DijabetesTV je telemedicinsko rješenje koji će Vama služiti za praćenje rezultata liječenja i kontrolu dijabetesa.

### Zašto bi se priključio DijabetesTV-u?

Platforma, Vama kao liječniku, nudi značajne prednosti za podizanje kvalitete rada i skrbi za osobe oboljele od šećerne bolesti.

Povećan je pristup bolesnicima koji su slabije regulirani i kontrolirani, pri čemu se pruža dodatna zdravstvena zaštita kroz članke i video materijale. Poboljšani su klinički ishodi za bolesnike.

DijabetesTV bolesnicima je dostupan neovisno o lokaciji. Reproducirati se može neovisno o vremenu čime se postiže brži i praktičniji format edukacije za bolesnike.

Praćenjem bolesnika u realnom vremenu sa sobom nosi i značajan uspjeh kod poboljšanja stanja. Savjeti za njegu bolesnika lako su razumljivi čime je povećano zadovoljstvo bolesnika i telemedicinskog rješenja.

Lakše i brže potaknite uspješne rezultate liječenja!

### Postupak registracije liječnika

Pristup sustavu moguć je uz uvjet da ste Vi kao liječnik pristali na korištenje platforme DijabetesTV. U dogovoru s Vama osobno ćemo Vas registrirati na platformu.

Za dodatne informacije obratite se centru za pomoć ili pročitajte opće uvjete korištenja.

Nakon registracije bolesnici će Vas moći odabrati kao izabranog liječnika na adresi:

[www.dijabetes.tv](http://www.dijabetes.tv)

Ako Vam je potrebna tehnička podrška ili želite prijaviti poteškoću u radu naših usluga možete se obratiti centru za pomoć na telefonski broj +3851 3535 480.

### Zašto savjetovati bolesnicima da se uključe?

Toliko ljudi ima pristup brzim internetskim vezama i računalima, zašto ovu mogućnost bolesnici ne bi iskoristili?

Osim što nema dodatnih troškova vezanih uz prijevoz, nema potrebe izbjivanja s posla, troši se manje vremena u čekaonicama te se brže dolazi do savjeta liječnika. Ukratko, iz udobnosti

vlastitog doma bolesnici su pod Vašim nadzorom, a uz to se na DijabetesTV-u mogu dodatno educirati.

### Kako Vi možete uključiti bolesnike?

Bolesnicima preporučite DijabetesTV i samu registraciju. Nakon registracije i popunjavanja svoga profila, bolesnik odabire Vas kao liječnika.

### Koje uređaje bolesnici trebaju imati?

Da bi bolesnici pristupili DijabetesTV-u potrebno je imati glukometar U Right-4279 kojim će ga s USB kablom svakih nekoliko dana spojiti s računalom i prenijeti podatke.

Uz glukometar U Right-4279 idu pripadajuće test trakice U Right-4279.



### Kada moram gledati DijabetesTV?

Preporuka je svakodnevno odvojiti neko vrijeme za pregledavanje pacijenata prema filteru kojega ste odabrali.

### Kako mogu dodati novog bolesnika?

Podaci bolesnika koje odobrite pod «Vaše bolesnike» vidljivi su isključivo Vama. Oni će se naći u tabličnom prikazu postojećih bolesnika.

## 2.0. DijabetesTV

Opći upiti i tehnička podrška dostupna je: [info@supreme-pharma.com](mailto:info@supreme-pharma.com)

Kontakt podaci:

Supreme Pharma

[info@supreme-pharma.com](mailto:info@supreme-pharma.com)

Centar za pomoć: 01/ 3535 480

### Kako pristupiti sustavu?

Pristup platformi DijabetesTV omogućen je Internet preglednikom instaliranim na WINDOWS OS računalo (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge itd.)

### 3.0. Što se prati kroz DijabetesTV?

Na početnoj stranici platforme DijabetesTV vidjet ćete informacije samo Vama dostupne, a to su podaci bolesnika koji su Vas odabrali kao izabranog liječnika.

#### Kako pregledati podatke bolesnika?

U početnom dijelu prikazani su opći podaci bolesnika.

Na vrhu tabličnog prikaza bit će prikazana imena i prezimena bolesnika s vrijednostima koje Vi filtrirate prema onome što želite vidjeti.

#### Detaljniji prikaz podataka bolesnika

Pristupom na platformu DijabetesTV vidjet ćete glavni izbornik i opcije:

- Osnovne podatke
  - Ime i prezime, najnovija pohrana vrijednosti, datum i vrijeme zadnjeg mjerenja, mjesto stanovanja i e-mail adresa.

#### Moji pacijenti

Prikaži: 10 upisa Traži:

Ime i prezime	Zadnje mjerenje	Zadnje otvaranje kartona	
Macan Darko		2018-03-27 08:49:01	
Starešinčić Jurica		2018-03-27 08:49:20	
Markić Marko	2018-03-27 <b>6.6</b>	2018-03-27 09:54:06	
Milas Robert	2018-03-21 <b>4.6</b>	2018-03-27 08:49:12	
Bartolić Tomislav	2017-11-15 <b>5.8</b>	2018-03-27 08:48:57	

Prethodni 1 Sljedeći

#### Pregled kartona

Osnovni podaci Vrijednosti šećera Dnevnik težine Anketa Akcije/kontakt Povećaj


Ime i prezime: Marko Markić

**Najnovija pohranjena vrijednost: 6.6**  
izmjereno: 2018-03-27 09:39:00

Grad: Karlovac

E-mail: jurica3@dedal.hr


- Izmjerene vrijednosti šećera
  - Vrijednosti koje će biti više od ciljnih vrijednosti bit će izdvojene crvenom bojom.
  - Vrijednosti koje će biti u normalnim ciljnim rasponima prikazat će se plavom bojom.
  - Jednako tako, u polju s napomenama bolesnik može upisati razlog povišene razine šećera što će Vama biti vidljivo.

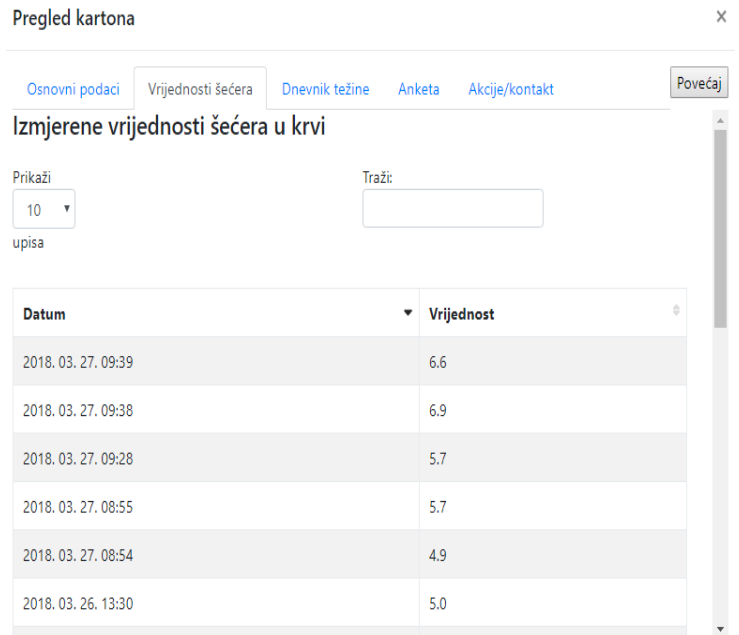

- Sheme glikemija



- Dnevnik tjelesne težine

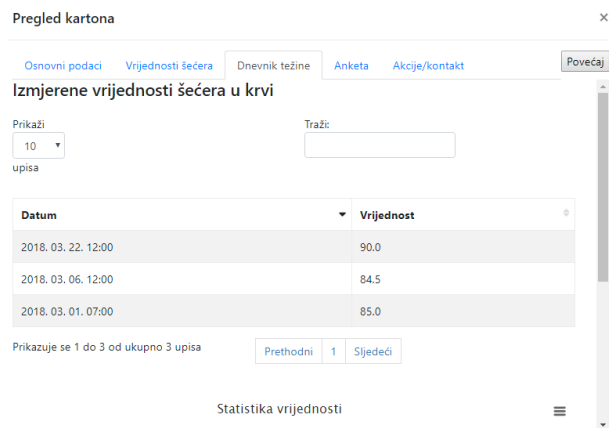

- Upitnik za bolesnika

Pregled kartona x

Osnovni podaci   Vrijednosti šećera   Dnevnik težine   Anкета   Akcije/kontakt   Povećaj

**Anketa**

Godina rođenja  
1979

Spol  
Muškarac

---

Je li tko iz uže obitelji imao dijabetes  
Da  
otac/majka, baka/djed

---

Pušač  
Ne

---

Pijete li alkohol?  
Rijetko

- Kontaktiranje bolesnika

Pregled kartona x

Osnovni podaci   Vrijednosti šećera   Dnevnik težine   Anкета   Akcije/kontakt   Povećaj

Akcija  
Dogovori ili odgovori pregled

**Trenutno naručen/a**  
Doći na pregled 14.6. u 10 sati.

Tekst  
Poruka

[Pošalji poruku](#)

### Kako se mijenjaju podaci o bolesniku?

Bolesnik u dogovoru s Vama, kao liječnikom, najmanje jednom tjedno spaja glukometar s računalom i prenosi podatke tako da Vam oni postanu vidljivima.

### Imam velik broj bolesnika. Mogu li ih sve pratiti kroz DijabetesTV?

Neovisno o broju bolesnika, gotovo svi se mogu pratiti kroz DijabetesTV. Najviše se mogu pratiti informatički pismeni bolesnici, a oni koji nisu ovise o tuđoj pomoći (bilo članu obitelji, liječnika ili medicinske sestre).

### Kako mogu uključiti moju dijabetološku sestru?

Dijabetološka sestra može biti uključena u gotovo sve što se tiče bolesnikove edukacije na DijabetesTV-u, savjeta vezanih uz prehranu i oko kontaktiranja bolesnika čije su vrijednosti mjerenja u normalnom rasponu.